

## CUSCINO ANTIDECUBITO VISCOFLEX PLUS\_ P361CAXXXXXX1HW



### DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Cuscino a forma anatomica con stabilizzatori laterali e frontali e inserto per lo scarico delle prominenze ossee ischiatrico-sacrali, in polimero cellulare viscoelastico ad alta densità in grado di memorizzare la sagoma del corpo; ciò determina una netta diminuzione delle pressioni transcutanee aumentando i punti di appoggio e migliorando, quindi, la circolazione sanguigna. I canali di areazione ottimizzano il microclima. La copertura di cui è dotato è di materiale traspirante al vapore acqueo e impermeabile ai liquidi per permettere una semplice pulizia ed un buon comfort del paziente evitando macerazione della cute.

La bi-elasticità della fodera permette di ridurre le forze di frizione e taglio causa di lesioni cutanee.

La schiuma viscoelastica da cui è composto permette un perfetto adattamento del supporto alla morfologia del paziente, distribuendo le pressioni di contatto eliminando eventuali punti di pressione dannosi.

L'anima stabilizzatrice a "ferro di cavallo" in schiuma ad alta resilienza, posta all'interno del materiale viscoelastico, permette di ridurre ancora meglio le pressioni in corrispondenza della regione sacrale perchè consente una immersione del sacro nello spessore completo di viscoelastico mantenendo le zone a minore incidenza di lesioni da pressione, sostenute dalla schiuma ad alta resilienza.

Indicazioni di utilizzo: presenza di lesioni dal I al II stadio (EPUAP) (con riposizionamento) e/o presenza di un elevato rischio di sviluppo di piaghe

Densità del polimero viscoelastico: 80 Kg/m<sup>3</sup>

Densità della schiuma ad alta resilienza: 40 Kg/m<sup>3</sup>

Permeabilità della copertura: > 240 g/m<sup>2</sup> 24h

#### Materiali

Cuscino: Polimero viscoelastico ad alta densità e Schiuma di poliuretano ad alta resilienza

Copertura: Polymaille

#### Pulizia/decontaminazione/disinfezione:

Cuscino: Pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciar asciugare all'aria. Disinfettare mediante prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi, ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave.

Copertura: Lavare a 95°C, non utilizzare candeggina, non stirare. Lavaggio a secco con



## CUSCINO ANTIDECUBITO VISCOFLEX PLUS\_ P361CAXXXXXX1HW

solventi tipo P. Asciugare in asciugatrice a temperature moderate.

### GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
<b>P361CA32321HW</b>	Viscoflex Plus 32 x 32 h 8 con fodera. Portata Max Paziente: 50 Kg	66271/R	Y033303
<b>P361CA36361HW</b>	Viscoflex Plus 36 x 36 h 8 con fodera Portata Max paziente: 50 Kg	66271/R	Y033303
<b>P361CA38381HW</b>	Viscoflex Plus 38 x 38 h 8 con fodera Portata Max paziente: 90 Kg	66271/R	Y033303
<b>P361CA38431HW</b>	Viscoflex Plus 38 x 43 h 8 con fodera Portata Max Paziente: 90 Kg	66271/R	Y033303
<b>P361CA40401HW</b>	Viscoflex Plus 40 x 40 h 8 con fodera Portata Max Paziente: 100 Kg	66271/R	Y033303
<b>P361CA42421HW</b>	Viscoflex Plus 42 x 42 h 8 con fodera Portata Max Paziente: 100 Kg	66271/R	Y033303
<b>P361CA42461HW</b>	Viscoflex Plus 42 x 46 h 8 con fodera Portata Max Paziente: 110 Kg	66271/R	Y033303
<b>P361CA45421HW</b>	Viscoflex Plus 45 x 42 h 8 con fodera Portata Max Paziente: 110 Kg	66271/R	Y033303
<b>P361CA45461HW</b>	Viscoflex Plus 45 x 46 h 8 con fodera Portata Max Paziente: 130 Kg	66271/R	Y033303
<b>P361CA48431HW</b>	Viscoflex Plus 45 x 46 h 8 con fodera Portata Max Paziente: 140 Kg	66271/R	Y033303
<b>P361CA51461HW</b>	Viscoflex Plus 45 x 46 h 8 con fodera Portata Max Paziente: 150 Kg	66271/R	Y033303
<b>P361CA51501HW</b>	Viscoflex Plus 45 x 46 h 8 con fodera Portata Max Paziente: 160 Kg	66271/R	Y033303
<b>P361CA56461HW</b>	Viscoflex Plus Bariatrico 56 x 46 h 10 con fodera Portata Max Paziente: 230 Kg	66271/R	Y033303
<b>P361CA61501HW</b>	Viscoflex Plus Bariatrico 61 x 50 h 10 con fodera Portata Max Paziente: 270 Kg	66271/R	Y033303

### INFORMAZIONI GENERALI



## CUSCINO ANTIDECUBITO VISCOFLEX PLUS\_ P361CAXXXXXX1HW

<b>FABBRICANTE</b>	SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédât 47300 Villeneuve sur Lot Francia
<b>DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA</b>	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia

### DATI REGOLATORI

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I
--	---